

טופס כללי להנחיות שליחת דגימות למכון הגנטי

בדיקות מולקולריות:

תנאי לקיחה שינוע ושימור

מקור הדגימה: דם ורידי, אין צורך בצום.

אופן לקיחת הדגימה: ע"פ נוהל משרד הבריאות "רישום דגימות וסימון נוהל מספר 2 CL11004"
נפח הדגימה: לפחות 5 מ"ל.

המבחנה: מבחנת EDTA (וקוטיינר) בנפח של 9 מ"ל, מפלסטיק.

אריזת המבחנה: יש להעביר המבחנות באריזה בטוחה (לדוגמה קל-קר או מעטפה מרופדת) בדואר שליחים, FedEx וכו' בהתאם לנוהלי משרד הבריאות "בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים

ודגימות לאבחנה רפואית מעבדתית". חשוב לסגור המבחנות היטב.

זיהוי המבחנה: על כל מבחנה צריכים להיות פרטים מזהים וברורים, רשומים או מודפסים על מדבקה

(לפחות שני פרטי זיהוי).

שמירת הדגימות: יש לשמור הדגימות במקרר עד למשלוח (אפשר לשמור במקרר כשבוע). **אין להקפיא**

בשום אופן דגימות של דם.

שינוע הדגימות: בטמפ' החדר. על הדגימה להגיע למעבדה הגנטית בימים א-ה עד השעה 14:00.

טופס מלווה למבחנה: למבחנה יש לצרף טופס הזמנת הבדיקה (טופס מכון גנטי). טופס זה חייב להכיל את כל

פרטי הזיהוי הרשומים על המבחנה. יש למלא אותו באופן מלא. חשוב במיוחד מילוי מוצא מדויק (מקום

הולדת אבות וסבים). טפסים ללא כל הפרטים הדרושים יוחזרו לתיקונים והטיפול בדגימה יתעכב. את

המסמכים יש לשלוח במעטפה נפרדת, לא יחד עם הדגימות.

שלב ההיריון: לא יתקבלו דגימות של בני זוג עם היריון בן 30 שבועות ומעלה.

האחריות על הסימון, השינוע ואיכות הדגימה, על הגורם המפנה את הבדיקה.

בצוע ודיווח תוצאה (מולקולרי)

הבדיקה תבוצע על פי נהלי המעבדה.

ע"פ חוקי משרד הבריאות עלינו לשמור דגימות דנ"א כשנה.

תוצאות מתקבלות לרוב לאחר 3-6 שבועות (כולל הרחבת בירור כאשר צריך). תשובות תקינות תשלחנה

בדואר.

הודעות נשאות/ מחלה תימסרנה באמצעות שיחת טלפון של יועצת גנטית תל השומר לנבדק או

לנציג מוסכם מהמכון השולח את הדגימה.

F-GEN-0005-4-40-12-02, עמוד 1 מתוך 1, בתוקף: 19/10/2014